

Einfach stimulieren. Mit dem GONAL-f® Pen.

Der GONAL-f® Pen macht die Stimulationstherapie einfach wie noch nie. Er ist gebrauchsfertig abgefüllt. Fehler beim Injizieren sind nahezu ausgeschlossen.

Die exakte Dosierung muss nur beim ersten Gebrauch eingestellt werden. Dank des Dosis-Gedächtnisses ist sichergestellt, dass Sie bei allen weiteren Injektionen automatisch die richtige Dosis erhalten.



1
Schutzhülle vom Pen abziehen. Das Gewindestück des Pens wird sichtbar.



2
Schutzfolie einer Nadelschutzkappe entfernen. Die Nadelschutzkappe fest auf das Gewindestück des Pens schrauben.



3
Dosierknopf drehen, bis der Dosierpfeil genau auf die benötigte Dosis zeigt.



4
Dosis laden, dafür den Injektionsknopf so weit wie möglich herausziehen.



5
Nadel in die Haut einführen. Injektionsknopf ganz durchdrücken. Nach 10 Sekunden die Nadel herausziehen und erst dann den Injektionsknopf loslassen.



6
Nadel entfernen. Pen-Schutzkappe auf das Gewindestück stecken. Der Pen kann bei Raumtemperatur gelagert werden.

Anmerkungen